

**IPOS MEDIKAL MASKE ZA ZAŠČITO PRED DELCI FFP2 NR, model IPOS – P20, 10 kosov, EN 149:2001 + A1: 2009, učinkovitost bakterijske filtracije  $\geq 95\%$**

Polobrazna zaščitna maska iz netkanega materiala.

Posamično pakirane.

Visoka učinkovitost filtracije.

Laminiran material.

Uporabnika ščiti pred kapljicami in aerosoli (samozaščita).

Izdelek je namenjen za enkratno uporabo, zamenjajte in odstranjujte redno.

Pogoji skladiščenja in transporta:

Maske hranite v embalaži, dokler jih niste pripravljene uporabiti. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo in kontaminacijo. Temperatura skladiščenja  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+30^{\circ}\text{C}$  z maksimalno vlažnostjo  $<80\%$ . Izdelek med transportom hranite v originalni embalaži.

Maska za enkratno uporabo.



**PRED UPORABO PREVERITE:** Preglejte masko, vključno z vsemi sestavnimi deli, da ni luknje, raztrganine ali poškodb. Če boste našli kakršno koli poškodbo, **JO NE UPORABITE**. Vzemite novo.

**NAVODILA ZA UPORABO:**

Obrnite masko naprej proti bradi in potegnite ušesna trakova za ušesa, dokler se ne počutite udobno.

Postavite prste obeh rok na sredino nosne zaponke in pritisnite navznoter, da se prilagodi obliki nosu.

Pri uporabi položite roke na obraz in preverite tesnost maske z obrazom.

Masko odstranite tako, da se dotaknete samo ušesnih trakov in ne segate v notranjost maske.

**OPOZORILO:** Neupoštevanje vseh navodil in omejitev uporabe tega izdelka lahko zmanjša učinkovitost maske respirator in povzroči bolezen ali smrt. Pravilno izbrana maska respirator je bistvenega pomena za zaščito vašega zdravja. Pred uporabo te maske respirator se posvetujte s strokovnjakom za industrijsko higieno ali strokovnjakom za varnost pri delu, da ugotovite ustreznost za vašo predvideno uporabo. Ta izdelek ne dovaja kisika. Uporabljajte samo v primerno prezračevanih prostorih, ki vsebujejo dovolj kisika za podporo življenju. Te maske respirator ne uporabljajte, kadar je koncentracija kisika manjša od 19%. Ne uporabljajte, kadar so koncentracije onesnaževalcev takoj nevarne za zdravje ali življenje. Ne uporabljajte v eksplozivnih atmosferah. Takoj zapustite delovno območje in se vrnite na svež zrak, če (a) dihanje postane težko ali (b) se pojavi omotica ali druga stiska. Dlake na obrazu ali brada in nekatere značilnosti obraza lahko zmanjšajo učinkovitost te maske respirator. Te maske respirator nikoli ne spreminjajte ali modificirajte na kakršen koli način. Maska respirator je samo za enkratno (enoizmensko) uporabo. Vzdrževanje ni potrebno. Uporabljeno masko respirator zavržite po uporabi v eni izmeni. Masko respiratorje do uporabe shranjujte v škatli, stran od neposredne sončne svetlobe.

Maske ne zdrobite ali deformirajte.  
Po nošenju se ne dotikajte površine maske.

POMEN PIKTOGRAMOV/SIMBOLOV:

- (a) Glejte navodilo za uporabo
- (b) Hranite na suhem
- (c) Omejitev temperature
- (d) Polipropilen
- (e) NR: maska je omejena samo na enoizmensko uporabo (z največ 8 urami) in se ne sme ponovno uporabljati.



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)

EU izjava o skladnosti: <https://www.sanolabor.si/artikel/maska-ffp2-z-zausesnimi-trakovi>

**CE 2841**

MNA LABORATUVARLARI SANAYI TICARET LIMITED ŞİRKETİ  
Küçükbakkalköy/Mah. Yenidoğan Cad. No: 21  
Atışehir/İSTANBUL  
Turkey



IPOS – Medikal Dış Ticaret A.Ş.

Eyüp Sultan Mahallesi Yedigörmüş Sokak No:14 Sancaktepe / İstanbul, Turçija



Sanolabor, d.d.

Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana, Slovenija